

Hoja de producto

Producto:

Máscara protectora KN95 / FFP2 Standard

Número de artículo: ZSMKN-20200310

Características:


- Máscara protectora tipo KN95
- Clase de protección: FFP2
- Certificado CE, cumplimiento de EN 149:2001 + A1: 2009
- Caja de 40 unidades
- Construcción mediante 4 capas no tejidas *meltblown*
 - Capa 1: Filtro de partículas grandes en material no tejido *spunbond*
 - Capa 2: Aislamiento electrostático PM2.5 por microfibras polímero *spunlace*
 - Capa 3: Filtro de partículas de 0,5 µm en material no tejido *spunbond*
 - Capa 4: Filtro de resto de polvo en material no tejido *spunbond*
- Filtrado BFE ≥ 95% de partículas y bacterias
(apartado 5.2.2 de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019)
- Respirabilidad: presión diferencial < 60 Pa/cm²
(apartado 5.2.3 de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019)

Construcción:



No. 2G200408.SHET076

Efficient meltblown material
4 layers of protective filtering for safer breathing protection

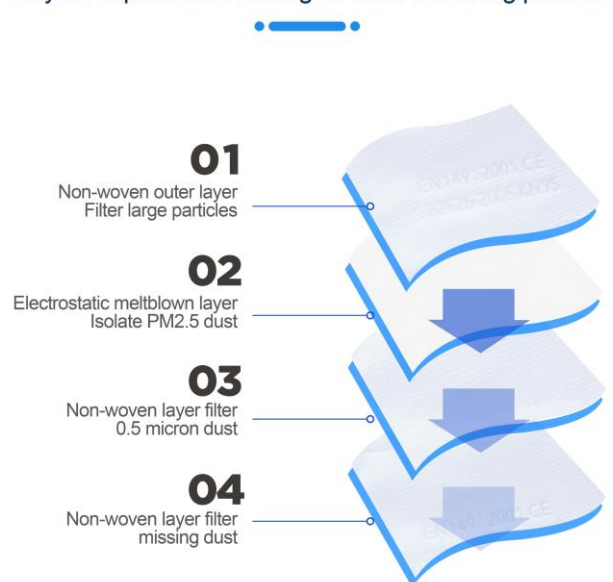

Instrucciones de uso

Producto:


Máscara protectora KN95 / FFP2 Standard

Número de artículo: ZSMKN-20200310

Normativa:

- UNE 0064-1/2:2020
- "ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016/425"

Utilización:

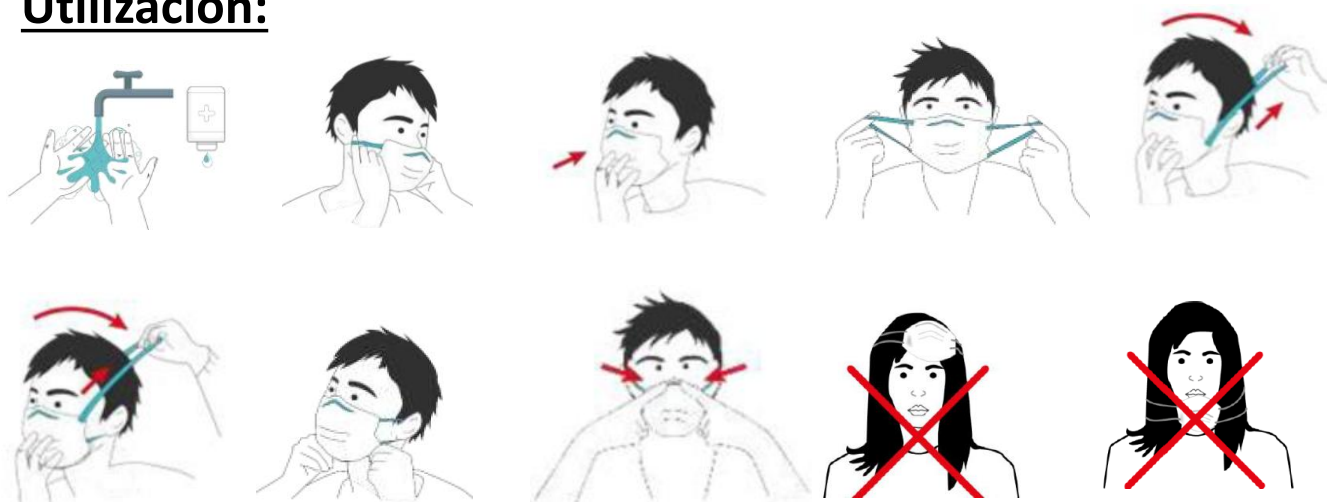

- 1-Lavarse las manos con solución hidroalcohólica o 20 segundos con agua abundante y jabón.
- 2-Identificar la parte superior de la mascarilla.
- 3-Colocar la mascarilla en la cara y ajustar la pinza nasal a la nariz.
- 4-Sostener la mascarilla desde el exterior y pasar el arnés de cabeza o anudarlo detrás de la misma, a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos.
- 5-Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.
- 6-Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.
- 7-Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz.
- 8-Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias.
- 9-Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.
- 10-No se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después del uso.
- 11-**PARA RETIRARLA:** quitarse los guantes de protección
- 12-Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
- 13-Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla.
- 14-Colocar la mascarilla que se va a desechar en un recipiente específico.
- 15-Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
- 16-Para reducir los riesgos del uso de estas mascarillas una vez usada se debe desechar, porque no es reutilizable y se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico.
- 17-Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 h. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra nueva. Sólo se puede usar varias veces si se retira de acuerdo con estas instrucciones.